

Mycí a dezinfekční automat G 7831 pro stomatologickou praxi



Mycí a dezinfekční automaty Miele

Představují profesionální a hospodárné řešení při přípravě instrumentária ve stomatologických praxích.

- ochrana proti infekci vyloučením manuálního mytí
- mytí a dezinfekce v jednom mycím cyklu
- důsledné mytí a dezinfekce instrumentária vč. turbínových a mikromotorových násadců
- validovatelná dekontaminační metoda


Mycí a dezinfekční automat G 7831

- minimální potřeba prostoru, šířka přístroje pouze 45 cm
- jednoduchá instalace, 1 N AC 230 V, 50 Hz, na studenou vodu a vodovodní odpad
- hospodárný a efektivní kondenzátor páry jako výměník tepla bez spotřeby vody
- elektronické řízení, jednoduchá obsluha programu prostřednictvím otočného voliče, úprava různých parametrů mytí
- v 850 (820), š 450, h 600 mm
- volitelný sériový port pro dokumentaci procesu (ČSN EN ISO 15883)



Příklad osazení

- O 801/2 horní koš / injektor s injektorovými adaptéry (AUF 2) pro přenosné instrumentarium
- stojan E 802 pro instrumentarium a stojan E 801 pro vyplachovací kelímky

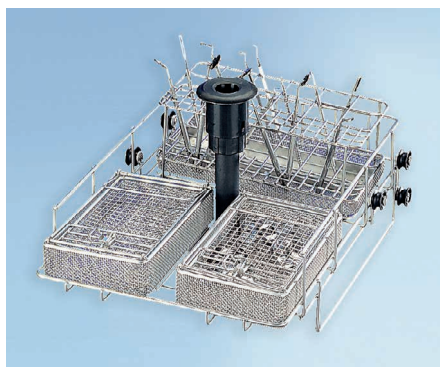

Příklad osazení

- O 800 horní koš / lafeta
- stojan E 802 pro instrumentarium a 2x misky E 146 se síťovým dnem pro instrumentarium nebo 1x E 146 a 1x E 363 s velikostí ok nerezového pletiva 1 mm – pro uložení drobného instrumentária, vrtáčků atd.



Příklad osazení

- U 800 dolní koš / lafeta
- stojan E 800 pro misky se síťovým dnem
- miska E 146 se síťovým dnem pro instrumentarium
- miska E 363 se síťovým dnem pro instrumentarium
- koš E 379 se síťovým dnem pro instrumentarium


Nástavec E 130 1/2 (bez vyobrazení)

- pro 10 tabletů nebo Tray-misek
- v 180, š 180, h 445 mm
- 11 držáků: v 170 mm, rozteč 35 mm

Systém ochrany proti infekci

7 kroků k hygienické přípravě instrumentária


Ve smyslu racionálního a hygienicky bezvadně fungujícího vedení praxe se prosadil tento postup přípravy instrumentária:

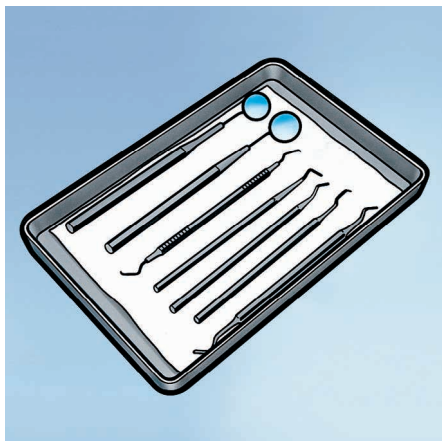

1. Dodávka instrumentária


2. Likvidace odpadu

Přímo po ošetření je použité instrumentarium a pomocné prostředky dopraveno na Tray-miskách nebo tabletech do centrálního prostoru pro přípravu. Při strojové dezinfekci není nutná mokrá likvidace. Odpad je odstraněn pomocí pinzety a odhozen do nádoby na odpad.

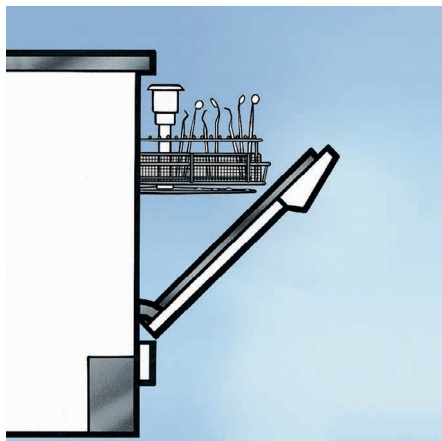


3. Mytí a dezinfekce

Při strojové přípravě je instrumentarium uloženo do termodezinfekčního zařízení tak, že je naskládáno do přihrádek na instrumentarium, položeno do síťových misek nebo postaveno do speciálních držáků. Lze sem umístit i Tray-misky. Duté instrumentarium se nasadí na injektorové trysky. Kontaminovaný materiál lze v automatech skladovat jako suchý 5–6 hod.

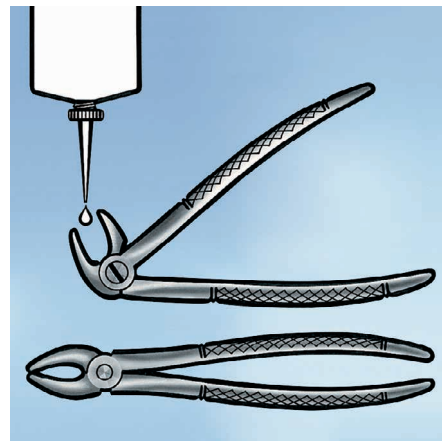

4. Kontrola a zkouška


Instrumentarium je po mytí, dezinfekci a sušení kontrolováno. Poškozené nebo opotřebované instrumentarium je vytříděno. Kloubové instrumentarium musí být ošetřeno bílým olejem určeným pro lékařskou techniku. Instrumentarium, u něhož není nutná závěrečná sterilizace, je uloženo do centrální skříně nebo do ordinace.

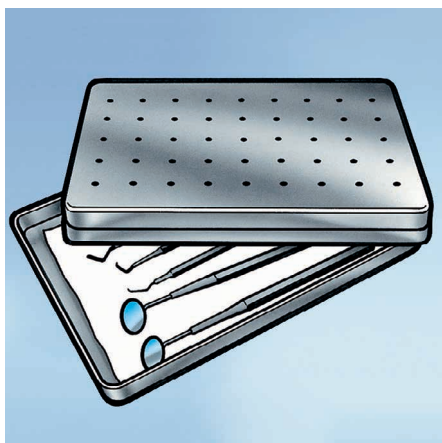

5. Příprava sterilizace


Jednotlivé instrumentarium – např. chirurgické kleště – a malé sady instrumentária je zavařeno do fólie.

Kompletní sady instrumentária jsou pak uloženy v Tray-miskách pro sady. Na kazety jsou nalepeny indikační proužky.

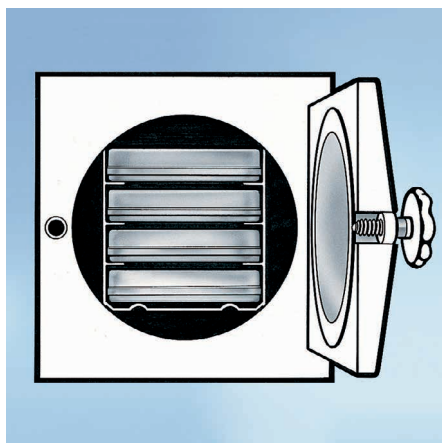

6. Sterilizace

Sterilizace se provádí zejména v parním sterilizátoru (autoklav) nebo v horkovzdušném sterilizátoru s automatickou cirkulací vzduchu.

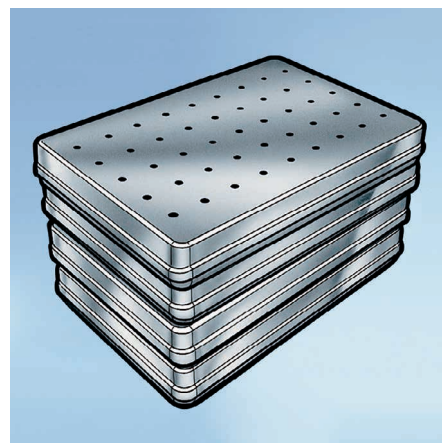

7. Hygienické skladování

Instrumentarium, které bylo sterilizováno ve fóliích nebo v kazetách, je uloženo v ordinaci.

Instrumentarium, které se používá téměř při každém ošetření, je skladováno v ošetřující místnosti v prachotěsných skříních a zásuvkách.

**Bezpečnost, hospodárnost,
validovatelnost**

Miele, spol. s r.o. • Holandská 4 • 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111 • Fax: 543 553 149 • Servis-tel.: 800 MIELE1 (800 643 531)
E-mail: info@miele.cz • Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG / Chybí a změny vyhrazeny / CZ 3/2017